

Bedienungsanleitung für *LEDental Loupe 2,5-fach / 3,5-fach*

1. Sicherheitsmaßnahmen

Lesen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung sorgfältig durch und betreiben Sie das Gerät korrekt.

Diese Hinweissymbole ermöglichen Ihnen die sichere Anwendung dieses Produkts und vermeiden Gefahren und Schäden für Sie und andere. Sie sind nach Ausmaß und Schwere der Gefährdung oder Schädigung eingestuft. Alle Hinweise und Symbole betreffen die Sicherheit und müssen beachtet werden.



Dieses Zeichen warnt vor einer extrem gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Gefahrenhinweises zu Tod oder schwerer irreversibler Verletzung führen wird.



Dieses Zeichen warnt vor einer gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Gefahrenhinweises zu Tod oder schwerer irreversibler Verletzung führen kann.



Dieses Zeichen warnt vor einer gefährlichen Situation, bei der die Nichtbeachtung des Gefahrenhinweises zu leichter reversibler Verletzung führen kann.



Dieses Zeichen warnt vor Situationen, bei der die Nichtbeachtung des Hinweises zu Beschädigungen des Geräts oder zu Fehlfunktionen führen kann.

2. Allgemeines

Mit zwei Schrauben (1 in Abb. 1) wird die Lupe entweder am Sporty Frame, am Double Frame oder am Headband befestigt. Mit dem Doppelgelenk (2 in Abb. 1) können die Optiken optimal zu den Augen justiert werden. Der Pupillenabstand kann mit der mittleren Schraube (4 in Abb. 1) verändert werden.



Der Winkel zwischen den Optiken ist auf den Arbeitsabstand fest eingestellt. Die Optiken sind am Gestell verklebt, die Schrauben (3 in Abb. 1) dürfen nicht gelöst werden.

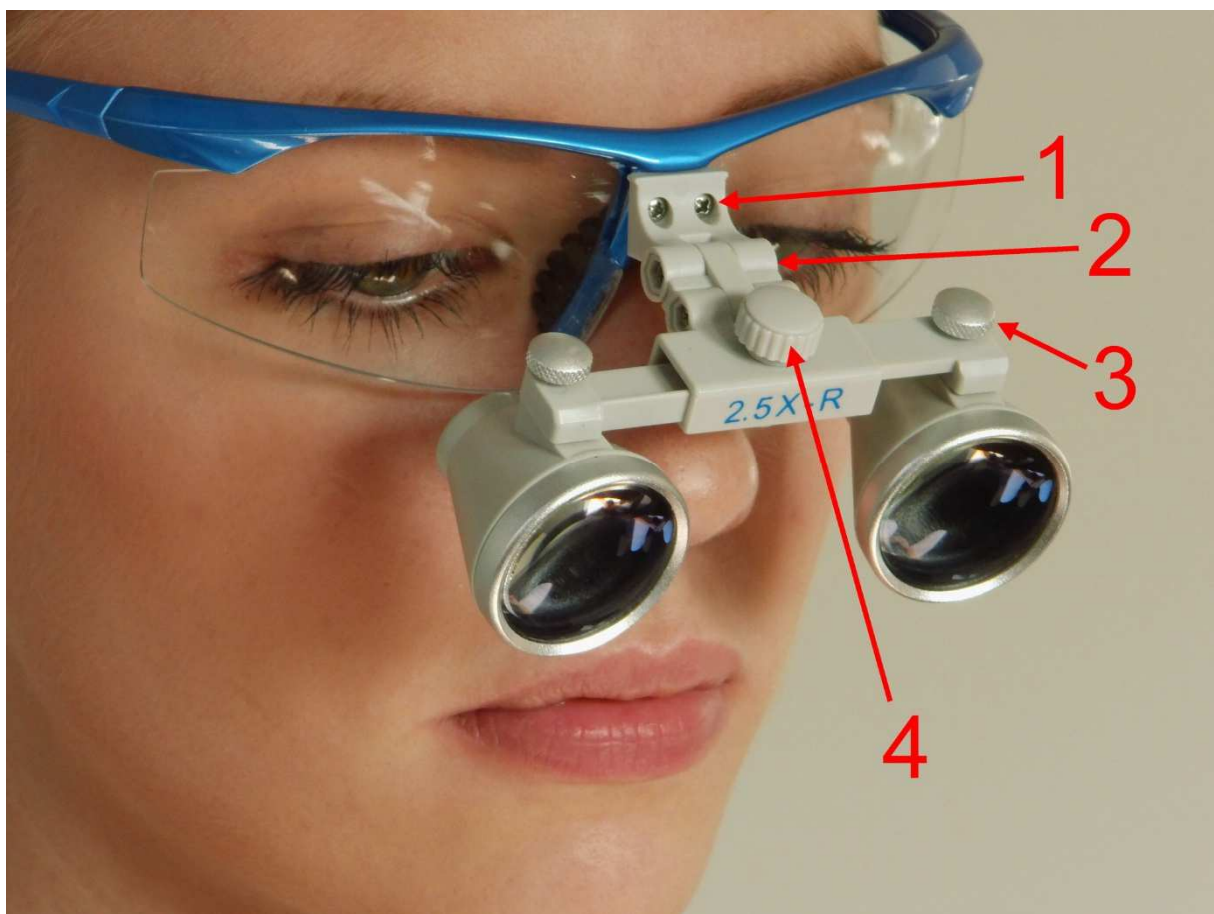


Abbildung 1

3. Befestigung am Sporty Frame

Um der Brille einen sicheren Halt zu geben, werden mit dem Brillenband die Bügelenden am Hinterkopf fixiert. Dieses wird dazu an den Kerben der Brillenbügel befestigt.

Die Silikon-Nasenbügel sind austauschbar.

4. Befestigung am Double Frame

Das Double Frame wird vor ihrer normalen Brille getragen. Um dem Frame einen sicheren Halt zu geben, werden mit dem Brillenband die Bügelenden am Hinterkopf fixiert.

Die Nasenbügel können bei Bedarf vorsichtig zusammen gedrückt werden.



Abbildung 2

5. Befestigung am Headband

Wenn die Lupe am Headband montiert wird, kann die Position der Optiken zusätzlich mit dem Gelenk (1 in Abb. 3) und der Gleitschiene (2 in Abb. 3) justiert werden.

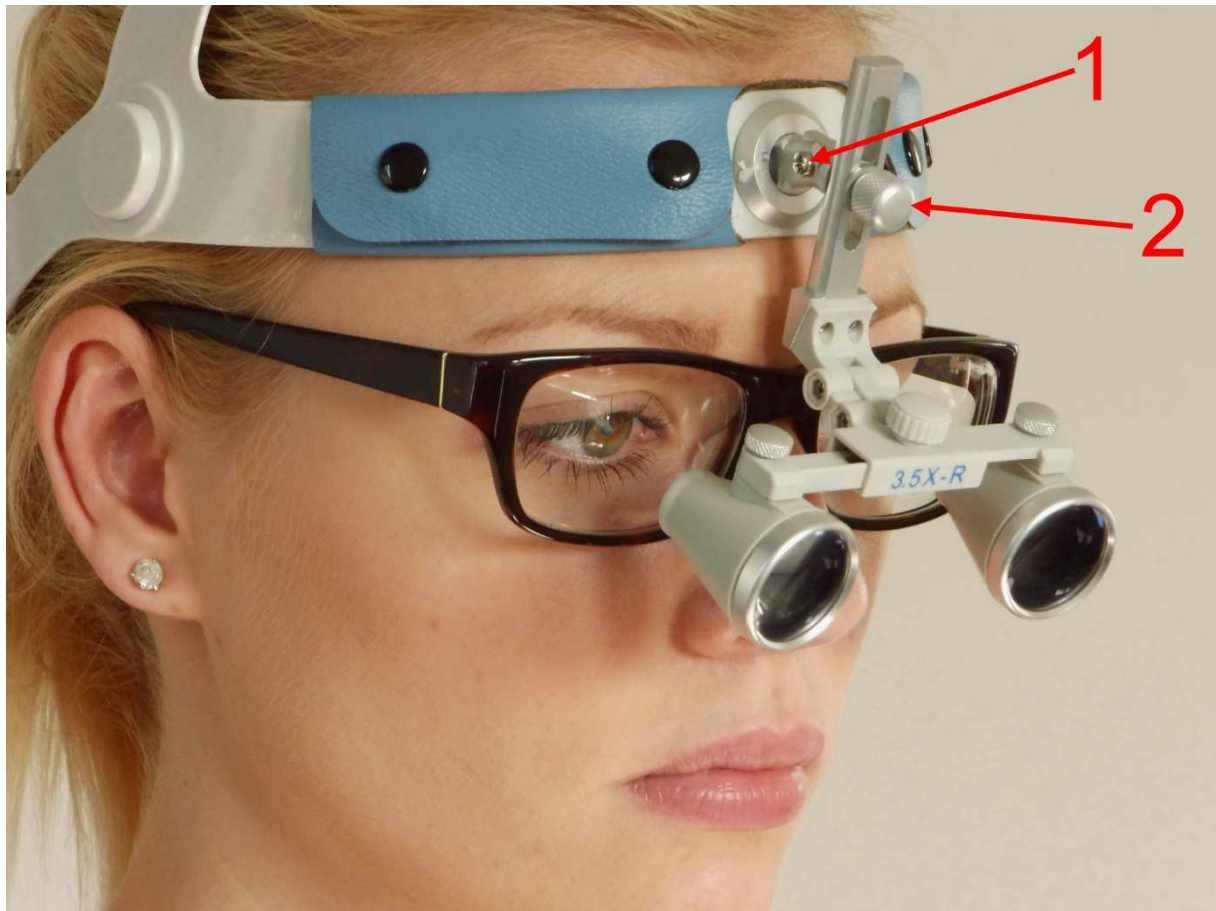


Abbildung 3

6. LEDental Power Light 3

Das LEDental Power Light 3 ist für die LEDental Loupe konzipiert und wird mit Hilfe des Loupe-Clips an dieser befestigt. Hierzu muss der Schenkel des Loupe-Clips mit der Nut am Ende unten liegen.

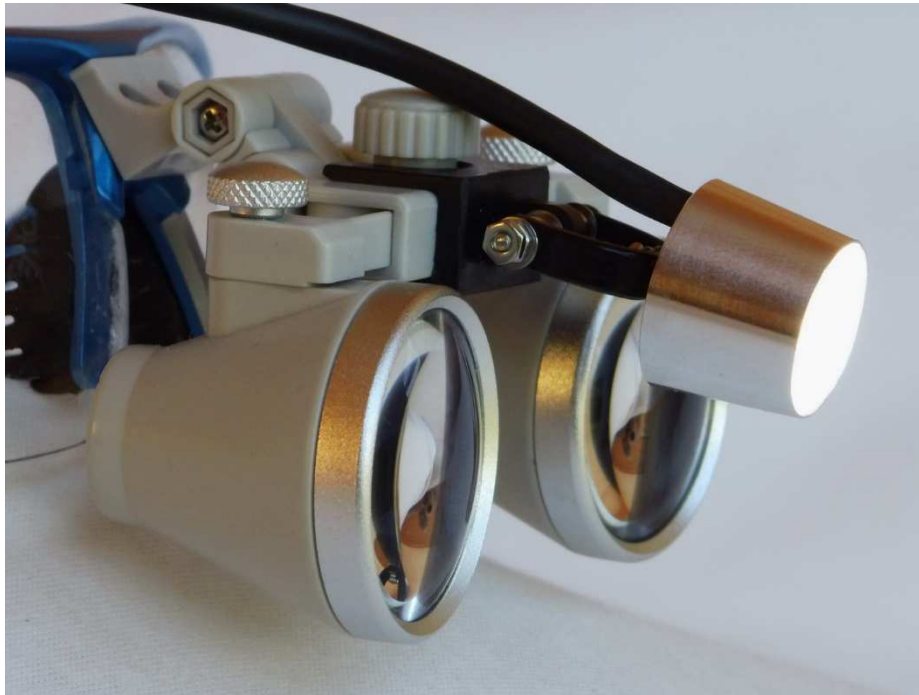


Abbildung 4

7. Technische Daten

LEDental Loupe 2,5x

Vergrößerungsfaktor: 2,5

Gewicht: 42 g

Arbeitsabstand:

2,5x-XS: 200-300 mm

2,5x-S: 280-380 mm

2,5x-R: 360-460 mm

2,5x-L: 440-540 mm

Durchmesser Sichtfeld:

2,5x-XS: 90 mm

2,5x-S: 95 mm

2,5x-R: 110 mm

2,5x-L: 130 mm

LEDental Loupe 3,5x

Vergrößerungsfaktor: 3,5

Gewicht: 47 g

Arbeitsabstand:

2,5x-S: 280-380 mm

2,5x-R: 360-460 mm

2,5x-L: 440-540 mm

Durchmesser Sichtfeld:

2,5x-S: 60 mm

2,5x-R: 65 mm

2,5x-L: 75 mm

LEDental GmbH
Mahlower Straße 28
15806 Zossen
☎ (03377) 20 41 39
Fax (03377) 200 79 65
mail@ledental.de
www.ledental.de

LEDental
medical headlights & more